

CANAL SOFT SCHIENE カナルソフトシーネ

—包帯・テーピング固定下の新素材—

循環路確保・血行促進・浮腫解消・温湿度環境改善

カナル技術の構造は、人体に接着する部分に血流の確保用に平行した連続する凹凸の溝を備えることで、溝の中に血管やリンパ管を退避させ一定の**血流を確保**しています。これによって血流を止めることを予防します。

捻挫など受傷箇所にカナル療法で固定することで圧迫による機能障害を防ぐ効果が期待できます。

指圧代用効果として

血行促進


テーピングによる
機能障害
の予防

筋肉のコリ
をほぐす

テーピングによる
ムレの改善

筋肉の改善

凹凸構造で血流を確保

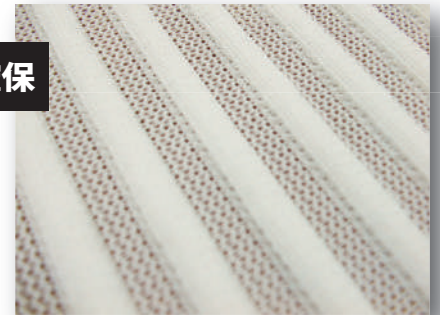

イメージ画像



循環路を確保できる
カナルソフトシーネ
使用している場合

イメージ画像



包帯等で圧迫される
カナルソフトシーネ
使用していない場合

カナル療法理論とは - 循環路確保固定 -

「カナル」とは「運河」という意味です。この理論は古来より柔道整復術として応用されている「循環路確保・固定」術が基本となっており、十二分な効果が学会等で評価されて多くの医療関係者に使用されています。



BLACK / WHITE
定価 ¥3,200 (税抜)



SIZE 100×28(cm)
ポリエステル 100%
日本製

※洗って繰り返しご使用できます。

NEW

Blood Flow Securing

—医療現場から生まれたカナル—



使用方法

- ① ご使用になる部位にカナルソフトシーネをハサミで適度な大きさにカットします。
- ② 凹凸部分を下にして、上からテーピング・包帯などで固定してお使いください。



前腕部・腱鞘炎など



腰部・腰痛など



足首・捻挫など

※テーピング使用例※

注意事項

- 長時間使用する場合はゆるめに巻いてください。
- 傷口には直接使用しないでください。
- 本品の使用により、発疹、発赤、かゆみなどの症状が現れた場合、ただちに使用を中止し、医師にご相談ください。
- 個人差がありますので不快感のある場合はご使用をおやめください。



脛・打撲など




太もも裏・肉離れなど

※写真はイメージです。粘着性はありません。

特許取得済みのセラミック複合機能材料（アースプラス）採用で抗菌・防臭効果

カナル凹凸パッドは、特許取得済みの、セラミック複合機能材料（アースプラス）を採用。優れた抗菌・防臭効果を持っています。洗濯を繰り返してもその効果は持続します。

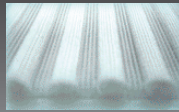

アースプラスとは 環境と人間に心地よい「セラミック複合機能材料」の新しいブランドです。

アースプラスの特徴

- 薬剤ではない、セラミック複合材料
- 高い抗菌機能、防臭機能を持つ
- 使用するセラミックは人体に無害なものを使用
- 効果が長期持続する

アースプラスの役割 e+(アースプラス)は、「臭い」「雑菌」「化学物質」などの分解、「ウイルス」の不活性化など主な役割とし、人や地球環境に優しく、生活・住環境、医療・介護など幅広い分野において、化学製品に頼らず対応することを可能にします。

推薦者



Dr. ジョアン

- ボルトガルサッカーチーム「ベンフィカ」チームドクター
- ボルトガルオリンピック委員会代表

ふくらはぎのサポーターの裏地にこのカナル地を使用したところ、選手の疲労軽減・回復にとても有効でした。カナル凹凸パッドも選手のケア時に使用しており、大変選手より好評です。東洋の理論に感銘しております。



F A X 注文書

FAX 番号 03-3234-1038

フリガナ
お名前

店名・社名

ご住所 〒

お届け先 〒
ご住所

TEL / FAX

e-mail

ご注文商品：カナルソフトシーネ

ブラック × _____ 個 ホワイト × _____ 個

※別途 消費税、送料、代引き手数料がかかります。



〒101-0061
東京都千代田区神田三崎町2-7-6
浅見ビル3F
Tel: 03-3234-1039 Fax: 03-3234-1038
www.seikosha-net.co.jp